

CATÁLOGO DE PRODUTOS

DIOXIDE

Desinfetante de alto nível

Hipoclorito de sódio
estabilizado a 4%

**Maior eficiência
no controle
microbiológico**



Eficiência contra vários microrganismos

- Staphylococcus aureus MRSA
- Staphylococcus aureus
- Salmonella choleraesuis
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Trichophyton mentagrophytes
- Candida albicans
- Mycobacterium smegmatis
- Mycobacterium massiliense
- Mycobacterium bovis (Tuberculose)
- Enterococcus faecium VRE (Resistente a Vancomicina)
- Enterococcus faecalis
- Bacillus subtilis
- Clostridium sporogenes
- Acinetobacter baumannii
- Klebsiella pneumoniae carbapenemase
- Candida auris
- Vírus Vaccinia Ankara modificado
- Vírus Hepatite B
- Vírus Hepatite C
- Filoviridae (Ebola)
- Flavivírus (Chikungunya e Dengue)
- Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
- Herpesviridae
- Vírus da Leucemia Celular Humana - HTLV -1 - Retrovírus
- Zika vírus
- Vírus Influenza
- Coronavírus
- Paramyxoviridae (Sarampo e Cachumba)
- Vírus da Rubéola
- Burkholderia cepacia
- Listeria monocytogenes

Vantagens de uso:

- Não corrosivo*;
- Não tóxico*;
- Não é necessário desmineralizar a água;
- Não necessita enxágue (exceto nos artigos semi-críticos);
- Produto não é prejudicial ao meio ambiente;
- Melhor custo x benefício;
- O descarte pode ser feito diretamente na rede, sem a necessidade de neutralizar.

**Na dose e tempo de contato recomendado.*

Finalidade de uso - Desinfecção de:

- Artigos semicríticos (Acessórios para Assistência Respiratória, Endoscópios Flexíveis, Nasofibrocópios, Espéculos (Vaginais ,retais, nasais), Lâmina e cabo laringoscópios, Transdutores Endocávitários, endovaginais, retais, esofágicos, catéteres de manômetria e phmetria, Anéis de haste diafragma, Tonômetros, óticas (camisas) para Histeroscopia Diagnóstica entre outros.);
- Artigos de nível intermediário (material de inaloterapia, assistência ventilatória e outros);
- Artigos não críticos (comadres, papagaios e outros);
- Superfícies fixas (bancadas, macas, pisos, paredes, vidros, acrílicos e outros);
- Telas touch, metais e outros;
- Áreas críticas (centro cirúrgico, UTIs, hemodiálise, banco de sangue e outros);
- Áreas semicríticas (enfermarias, ambulatórios e outros);
- Áreas não críticas (administrativo, superfícies em geral, sanitários e outros);
- Áreas de higiene hospitalar;
- Área de nutrição e dietética;
- Clínicas de especialidades (oftalmologia, ginecologia, hemodiálise, etc.);
- Clínicas de odontologia;
- Ambulâncias;
- Laboratórios de análises clínicas e patológicas;
- IML;
- Entre outros.



Modo de uso:

- Adicionar 5mL do produto **Atomic 70** para cada 1 litro de água. Tempo de Contato: 15 minutos;
 - A solução pode ser utilizada por um período de 24 horas;
 - A concentração da solução é comprovada através do uso de fita indicadora.
- Durante a manipulação do produto, recomendamos o uso de EPI's.**

ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Revitaliza os instrumentos

Remove manchas e previne o escurecimento e oxidações



Indicado para ser usado nos materiais já previamente limpos.



Possui finalidade de restaurar o brilho.



Remove sujidades minerais e pontos de oxidação encontrados em vidrarias, cremalheiras e instrumentais cirúrgicos fabricados em aço inoxidável.



Utilizado para neutralizar a alcalinidade residual ocasionada pelo uso de detergentes alcalinos no reprocessamento destes instrumentais.

**PRODUTO DE
ASSISTÊNCIA
À SAÚDE**



ATOMIC BRILHO DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO

Durante o manuseio

Antes de iniciar o uso, avalie o tipo de material no qual o produto será aplicado, em relação à:

- Reatividade;
 - Resistência;
 - Compatibilidade química de cada material;
- Os instrumentais devem estar previamente limpos antes de serem imersos na solução;
 - Para manchas mais resistentes, como placas minerais ou oxidações, escovar o instrumental com escova macia (*não utilizar escova metálica de cerdas duras*);
 - Em seguida, enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos de canais e fendas dos instrumentais e secar.

MODO DE USAR

		
Processo manual à temperatura ambiente	Diluir 50 mL do produto para cada litro de água	Manter os instrumentos submersos por 20 minutos
Processo manual e automatizado à temperatura aquecida (60°C a 80°C)	Diluir 50 mL do produto para cada litro de água	Manter os instrumentos submersos por 10 minutos
Após a limpeza dos instrumentais com detergente alcalino	Diluir 4 mL do produto para cada litro de água em temperatura ambiente ou aquecido (60°C a 80°C)	Manter a circulação da solução/ manter os instrumentos submersos por 2 a 5 minutos e enxaguar com água em abundância e secar



Melhora o desempenho das articulações



Prolonga a vida útil dos produtos para a saúde (PPS)



Alto rendimento



SINGULAR
PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES

Detergente Neutro **biodegradável** para uso hospitalar

Detergente neutro concentrado com alto poder de limpeza e excelente ação desengordurante, proporcionando limpeza rápida e eficaz na remoção de matéria orgânica.




**Dermatologicamente
testado**



Não corrosivo



Biodegradável

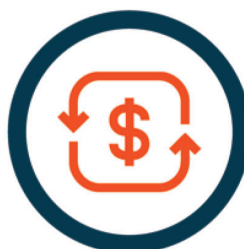

Alto rendimento



**Ideal para limpeza de
superfícies fixas, instrumental
cirúrgico e artigos
odonto-médico-hospitalares**



Não corrosivo

Pode ser usado com segurança em inox, alumínio, aço cirúrgico, acrílico, polipropileno, polietileno, vidro e outras superfícies laváveis. Não causa ressecamento em superfícies emborrachadas.

Detergente Neutro

Para limpeza de superfícies fixas, instrumentais cirúrgicos e artigos odonto-médico-hospitalares

- Alto poder de limpeza
- Ação desengordurante
- Tensoativo não iônico
- Não corrosivo



Modo de usar

Preparar a solução de limpeza com o Atomic DN-ULTRA, com água a temperatura ambiente, conforme o grau de sujidade existente.

Para limpeza pesada, diluir 250mL para 1 litro de água (250mL/L). Para limpeza média, diluir 20mL para 1 litro de água (20mL/L). para limpeza leve, diluir 10mL para 1 litro de água (10mL/L).

A solução com Atomic DN-ULTRA pode ser aplicada diretamente sobre a superfície, com o auxílio, de uma esponja ou fibra não abrasiva. Deixar agir por alguns minutos e, se necessário, esfregar. Quando possível, deixar os artigos e utensílios imersos na solução do produto diluído. Enxaguar em água corrente.



O Atomic ENZ+ é um detergente enzimático composto por cinco enzimas e mistura de tensoativos não-iônicos que confere ao Atomic ENZ+ eficácia de rápida ação na remoção de matéria orgânica




FINALIDADE

Indicado para limpeza manual e automatizada de artigos e instrumentais cirúrgicos, dispositivos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

O Atomic Enz+ contém **CINCO ENZIMAS**, cada uma com ação específica.

- **PROTEASE** – atua principalmente na degradação do sangue;
 - **LIPASE** – atua na degradação de gorduras;
 - **AMILASE**
 - **MANANASE**
 - **CELULASE**
- atua na degradação de componentes do bolo alimentar;

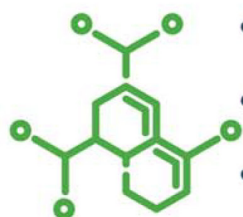

COMPOSIÇÃO

Protease, lipase, mananase, celulase, estabilizantes, agente regulador de pH, coadjuvante, mistura de tensoativos não-iônicos, fragrância, conservante e veículo.

RECOMENDAÇÕES QUANTO À QUALIDADE DA ÁGUA

pH 6,0 a 9,0; condutividade máxima: 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$; Dureza máxima: 500 mg/L CaCO_3 .

CARACTERÍSTICAS

Atividade Proteolítica mínima: 0,0864 UP.mL-1.min-1

Atividade Amilolítica mínima: 0,0523 UA.mL-1.min-1

Faixa pH puro: 6,5 a 8,5

Inflamabilidade: Líquido não inflamável

Corrosividade: Produto não corrosivo para aço cirúrgico, aço inox, acrílico, borracha, cobre, polietileno e polipropileno.

Irritabilidade: Não irritante

PRODUTO BIODEGRADÁVEL



MODO DE USO

Processo manual: Diluir o Atomic ENZ+ na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água, mergulhar os artigos deixando agir por no mínimo 5 minutos e enxaguar com água em abundância. Para melhores resultados indica-se a utilização de água quente até 55°C.

Processo Automatizado: Programar equipamento de limpeza automatizada com diluição do Atomic ENZ+ na proporção de 1 ml do produto para cada 1 litro de água. Para melhores resultados indica-se a utilização de água quente até 55°C.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM AMBIENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2 em 1 Detergente e Desinfetante

Para superfícies fixas
e artigos não críticos

Biguanida Polimérica e
Quaternário de Amônia
de 5ª Geração



Modelo Bombona 5L

Modelo Pulverizador 750mL



PRONTO PARA O USO



RÁPIDA AÇÃO



BIODEGRADÁVEL



ECONÔMICO

EFICÁCIA COMPROVADA EM

2 min

- **Superfungo:**
 - Candida auris
- **Bactérias Gram-negativas:**
 - Escherichia coli
 - Salmonella choleraesuis
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)
 - Acinetobacter baumannii
- **Bactérias Gram-positivas:**
 - Enterococcus hirae
 - Staphylococcus aureus
 - Staphylococcus aureus MRSA
 - Enterococcus faecalis VRE

Características

- pH neutro
- Livre de Álcool
- Biguanida Polimérica (2000ppm)
- Tensoativo não iônico
- Quaternário de Amônia de 5ª Geração (3000 ppm)
- Sem corante
- Sem perfume
- Não corrosivo
- Não inflamável



O Atomic Ready é indicado para superfícies fixas e artigos não críticos:

Oxímetro, Manguito de P.A, Estetoscópios, Termômetros, Almotolias, Comadres, Papagaios, baldes, bacias, Frascos de Diurese, entre outros.



Oxímetro



Estetoscópio



Aparelho de P. A.



Termômetro



Comadre



Almotolia

Modo de usar:

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, aplicar o Atomic Ready diretamente no local com auxílio do borrifador, pulverizador ou de um pano limpo umedecido com o produto.

Para limpeza e desinfecção de artigos não críticos, lavar com Atomic Ready, deixar agir por 2 minutos, se necessário, enxaguar e secar os artigos.

Durante a manipulação do produto, recomendamos o uso de EPI's.





@singularmed

(62) 3636-1391

www.singularmed.com.br